

BCL-Quat-Des-AZ
Desinfektionspräparat für den Bereich Dental

Anwendung im Bereich „Zahntechnische Laboratorien“
von Zahntechnikermeister Theodor Hassler

BCL-Quat-Des-AZ – Desinfektionspräparat im Bereich Dental

> Flächendesinfektionspräparat DGHM-geprüft (VORGÄNGERORGANISATION VAH)
DVG-geprüft

auf Basis

> „QUARTÄRE AMMONIUMVERBINDUNGEN“
> 100 GRAMM

=0,25 Gr BENZALKONIUMCHLORID

0,5 Gr DEBECYLDIMETHYL-AMMONIUM-CHLORID

(KEINE ALDEHYDE + PHENOLE)

GERINGE TOXITÄT

BIOLOGISCH ABBAUBAR

Anwendung

von BCL-Quat-Des_AZ – , Desinfektionspräparat für den Bereich Dental

für den „Zahnärztlichen und Zahnteschnischen Bereich“
wird in den Laboren als

> Abdruckdesinfektionspräparat

>bei einer Einwirkzeit von 1 - 2 Minuten<

mit großem Erfolg eingesetzt.

Bei

- **Alginaten**
- **Hydrocolloiden**

sollte die Einwirkzeit von 1 Stunde nicht überschritten werden

Bei

> Gummiabdruckmassen wie

- **Coltex**
- **Impregum**

wird eine Entspannung der Oberfläche beobachtet, der Gips fließt blasenfrei ein.

Die Desinfektion ist ohne Oberflächenbeschädigung und Dimensionsveränderung möglich.

Keine Verfärbung der Abdrücke resp. Der Gipsmodelle.

> 1 Minuten einlegen oder satt besprühen und feucht halten

Bei

- **Polyäther – (z. B. Impregum)**
- **Silikonabformungen**

fließt der Gips durch Entspannung der Oberfläche ohne zu „rollen“ und ohne Blasenbildung in die feinsten Unebenheiten.

Besondere Entspannungsmittel sind nicht mehr erforderlich.

Zur

> **Desinfektion vom Bimsstein** empfiehlt sich ebenfalls eine
> Einwirkzeit von mindestens 1 Minute

Es hat den Vorteil, das beim Polieren (Wärmeentwicklung) weder eine

> **Geruchsbelästigung noch**
> **Reizungen der Atemwege eintreten.**

> Der Bimsstein wird entweder immer feucht gehalten oder nach dem Austrocknen wieder mit einer Lösung befeuchtet

Der Bimsstein ist noch Wochen hell und durch Vermeidung eines allfälligen

> Bakterienherdes, geruchsfrei.

Die totale Auswechslung des Bimssteins erübrigt sich, nur der Verschleiß wird ersetzt.

Beim

> **Anmischen**
> **Wiederbefeuchten**

einen Spritzer einmischen.

BCL Aktiengesellschaft